

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Генерального директора
ООО «ИНТМЕД»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Одежда медицинская одноразовая

(Халаты: хирургические, медицинские, рубашка, брюки, фартук, нарукавники, маска для лица, шапочка, бахилы (чехлы для обуви))

Информация взята с официального сайта
int-med.ru

1. Назначение.

Одежда медицинская одноразовая (Халаты: хирургические, медицинские, рубашка, брюки, фартук, нарукавники, маска для лица, шапочка, бахилы (чехлы для обуви)), предназначена для применения взамен хлопчатобумажной медицинской одежды при оказании лечебно- профилактической помощи, оперативных вмешательствах, в процедурных и перевязочных кабинетах, клиниках, больницах. Одежда может быть использована в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

1. Основные технические характеристики.

Халаты, рубашка, брюки, шапочка медицинская, маски для лица изготовлены из нетканых материалов, маски выпускается на резинках и на завязках. Халаты, брюки,

Материал: нетканый материал Спанбонд SMMS

1) Шапочка медицинская.

Материал: нетканый материал Спанбонд SS

2) Маска для лица.

Материал: нетканый материал Спанбонд S

3) Бахилы (чехлы для обуви).

Материал: PE - 100% полиэтилен, CPE - хлорполиэтилен.

2. Противопоказания к применению.

Индивидуальная непереносимость материала.

3. Подготовка к применению изделия.

Вскрыть групповую упаковку, извлечь необходимые для работы изделия и использовать согласно маркировки. В случае необходимости провести стерилизацию изделий в условиях лечебного учреждения .

4. Правила хранения и использования.

Транспортирование изделий производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по ГОСТ 7000. Изделия устойчивы к условиям хранения и транспортирования по ГОСТ 15150.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности изделий - 10 лет со дня изготовления