

Жгут фиксирующий резиновый  
в текстильной оплетке  
В коробке: 400шт.

---

**Жгут фиксирующий резиновый  
в текстильной оплетке**

Длина: 40 см

Длина детского: 35см

Ширина: 2,5см

Толщина: 0,2см.

Предназначен для перетягивания вен при взятии крови, для остановки кровотечения при травме.

В упаковке: 50шт.

Срок годности: Не ограничен.

Дата производства:

Предназначен для перетягивания вен при взятии крови, для остановки кровотечения при травме.

Его применение облегчает процедуру взятия крови благодаря удобному пластмассовому замку, позволяющему затягивать и снимать жгут одной рукой.

В составе жгута отсутствует латекс. Для очистки и дезинфекции жгута могут использоваться дезинфицирующие растворы или возможна стирка в моечной машине для медицинских инструментов при 80оС.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОРАЗОВОГО ЖГУТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С  
Инструкцией ниже:**

Многоразовые жгуты используются во время процедуры взятия венозной крови. Замедление тока венозной крови приводит к застаиванию крови в венах, которое делает их более заметными и облегчает их поиск. Жгут не должен перекрывать ток артериальной крови.

Наденьте петлю многоразового жгута выше предполагаемого места венепункции, размер петли меняется в соответствии с размером ладони пациента.

Многоразовый жгут не должен причинять пациенту неудобство и боль. Он должен быть достаточно затянут, чтобы ограничить ток венозной крови, но не препятствовать ему. Рекомендуется снижение систолического давления на 20 - 30 мм рт. ст., т.е. у здорового пациента с систолическим давлением около 120 - 130 мм рт. ст. оно снизится до 100 мм рт. ст.

Не прикладывайте больших усилий к замку жгута и избегайте резкого затягивания ленты, так как это сокращает срок службы многоразового жгута и может привести к поломке замка.

Продолжительность наложения жгута не должна превышать 1 минуту (риск неверных результатов вследствие гемоконцентрации).

Если требуется больше времени для взятия проб крови, необходимо снять жгут, чтобы восстановить ток крови в полном объеме и вернуть коже нормальный цвет.

Если цвет кожи примет синюшный оттенок, немедленно снимите жгут и не затягивайте его до тех пор, пока кожа не примет первоначальный цвет.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте многократный жгут на руке больше, чем на одну минуту. В случаях, когда ток крови недостаточен для отбора, слегка затяните жгут на время взятия крови.

Как только кровь начнет поступать в вакуумную пробирку для взятия венозной крови, ослабьте петлю и снимите жгут.

При значительном уменьшении поступления крови в пробирку, повторно наденьте жгут на руку на короткое время.

Информация получена с официального сайта  
ООО «ИНТМЕД»  
int-med.ru